

装着したまま、シールド部分が開閉できる

可動式 フェイスシールド

フェイスシールドを取らなくてもシールド部分を上げて、簡単に水分補給や食事ができます。

食事に最適!

● 飛沫をしっかりブロック

唾液飛沫、ホコリ、花粉などから顔を守る。

● シールド部は、高透過率PETを使用

透明感が高く、クリアな視界を確保。
※使用前にシールドの両面に貼ってある保護フィルムは剥がしてご使用下さい。

● フリーサイズ設計

ゴムバンドとストッパーで、誰にでもピッタリとフィットするフリーサイズ設計。眼鏡を付けたままでも装着ができます。


■ フレームにシールドを装着するだけの簡単、組み立て



① シールド部の両面に貼られているキズ防止保護フィルムを剥がします。
※シールド部に表裏はありません。



② フレーム中央部 2 か所の突起をシールドの穴に差し込みます。

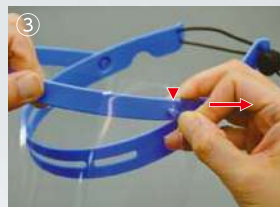

③ フレーム左右 2 か所の突起はシールドを少し引っ張る様にして、穴に差し込みます。

■ 使用上の注意

・本製品は液体飛沫や粉塵などが、顔にかかることを完全に防ぐことはできません。使用時はマスク併用をお勧めします。・固形物や火気などに対する保護具としては、使用しないでください。・万一破損した場合はご使用しないでください。・強風時、雨天時に屋外での使用はしないでください。・使用中や使用後はシールド表面には触れないでください。・シールドの上げ下げは両サイドのフレーム部を保持しておこなってください。・本製品は高温多湿や、直射日光が当たるような場所を避けて保管してください。・乳幼児の手が届かないところで保管してください。・火気の近くでは使用、保管しないでください。
※フェイスシールドはクリアな視界を確保する為に薄く設計されています。取り付け、使用時にフェイスシールドの端面で指などをケガしないようにご注意ください。

■ 製品仕様

シールド寸法: 約H195mm x W285mm 材質: シールド/PET、フレーム/PP、ゴム紐/ゴム・ポリエステル・弾性繊維、ゴム紐ストッパー/POM ※製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

発売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
TEL: 044-543-8884 受付時間: 平日 9:00~18:00

※お買い上げの際のレシートなどは、大切に保管してください。万一、初期不良の返品交換の際に必要です。



セット内容

フレーム×1

シールド×2

2枚

AZFS003

可動式フェイスシールド



シールド表面
PET

中紙

MADE IN CHINA



4 518707 299772